

## IMIGRAN 6 S.C. GEBRUIKSINSTRUCTIE GLAXOPEN

1.

### HET PLAATSEN VAN DE NAVULCASSETTE IN DE BEWAARCASSETTE

Open de bewaarcassette. Haal de navulcassette met daarin de 2 penvullingen uit de kartonnen verpakking. Plaats de navulcassette in de bewaarcassette door de drukknoppen in te drukken en de navulcassette naar beneden te duwen totdat de drukknoppen aan de buitenkant weer zichtbaar worden. Sluit de bewaarcassette.

2.

### HET GEBRUIK VAN DE GLAXOPEN

Open de bewaarcassette en open één van de klepjes van de navulcassette. U verbreekt hiermee één van de sluitzegels (let op de pijl). Trek de GlaxoPen uit de bewaarcassette.

3.

Plaats de GlaxoPen op de penvulling in de geopende navulcassette. Draai de GlaxoPen *een halve slag met de wijzers van de klok mee*. Druk hierbij nooit op de blauwe injectieknop.

4.

Trek de nu geladen GlaxoPen, *recht naar boven* uit de navulcassette. U kunt hierbij een lichte weerstand voelen. De GlaxoPen is nu klaar voor direct gebruik. De afdrukbeveiliging zorgt ervoor dat de GlaxoPen niet vanzelf afgaat.

5.

Plaats de GlaxoPen tegen de huid aan de zijkant van het bovenbeen. Duw het achterstuk van de GlaxoPen stevig tegen het voorstuk met daarin de penvulling. *Druk nu pas de injectieknop in en houdt de GlaxoPen vervolgens gedurende 10 seconden op zijn plaats*. Haal daarna de GlaxoPen voorzichtig weg. De naald steekt nog naar buiten.

6.

Plaats de GlaxoPen terug in de geopende navulcassette en draai de GlaxoPen onder lichte druk *een halve slag tegen de wijzers van de klok in* zodat deze weer los komt. De gebruikte penvulling blijft in de navulcassette achter. Sluit nadat u de GlaxoPen uit de navulcassette heeft gehaald het klepje van de gebruikte penvulling.

7.

De GlaxoPen kan pas weer gebruik worden als deze opnieuw gespannen is. Plaats hiervoor de GlaxoPen terug in de bewaarcassette. Druk de GlaxoPen vervolgens stevig naar beneden tot u een "klik" hoort. Sluit de cassette. Herhaal voor een nieuwe toediening met Imigran 6 s.c. de handelingen 2 tot en met 7. U dient hierbij *de nog niet gebruikte* penvulling te gebruiken.

8.

### VERVANGEN VAN DE NAVULCASSETTE

Wanneer de beide penvullingen gebruikt zijn dient de navulcassette vervangen te worden. Druk na het openen van de bewaarcassette op de beide drukknoppen van de navulcassette. Deze kan nu uit de bewaarcassette getrokken worden. De navulcassette met de lege penvullingen kan ingeleverd worden bij de apotheek. Een nieuwe navulcassette kan volgens afbeelding 1 in de bewaarcassette geplaatst worden.

